

POZNAJ SYSTEM

ISTEL Care

KTÓRY POMAGA LEPIEJ KONTROLOWAĆ CUKRZYCĘ



POZIOM
GLUKOZY



CIŚNIENIE
KRWI



ANALIZA
SKŁADU CIAŁA



TEMPERATURA
CIAŁA



BADANIE
EKG



www.istelcare.pl



 **ISTELE Health**

ISTELE  **ECG**



ISTELE  **Care**

ZDALNA KONTROLA ZDROWIA

Drogi Pacjencie!

Glukometr Abra Smart BT, który trzymasz w dłoni, daje Ci możliwość kontroli Twojego stanu zdrowia bez wychodzenia z domu. Od dziś możesz udostępniać lekarzowi swoje wyniki badań i konsultować je przy pomocy videoporady.

W jaki sposób? To proste!

Wystarczy pobrać aplikację **Istel Health**, utworzyć swój profil użytkownika i rozszerzyć go o konto w **Systemie Istel Care**. Dzięki funkcji Bluetooth pomiary z glukometru trafiają bezpośrednio do aplikacji, a następnie do Systemu, który umożliwia dzielenie się wynikami z lekarzem lub opiekunem. Korzystanie z aplikacji Istel Health oraz Systemu Istel Care jest bezpłatne, więc nie zastanawiaj się dłużej – załóż konto i korzystaj ze wszystkich możliwości, jakie daje Ci posiadanie glukometru Abra Smart BT.

Poniżej przeprowadzimy Cię krok po kroku przez proces instalacji aplikacji, parowania glukometru oraz zakładania konta w Systemie Istel Care.

Oferujemy również wsparcie telefoniczne. Zadzwoń, aby uzyskać pomoc podczas zakładania konta:

885 961 858


(pon. - pt. w godz. 8:00 - 16:00)

Dowiedz się więcej o Systemie Istel Care: www.istelcare.pl

Tylko **4 główne kroki** dzielą Cię od korzystania z możliwości, jakie daje aplikacja Istel Health oraz konto Pacjenta w Systemie Istel Care:

I. **INSTALACJA APLIKACJI** ISTEEL HEALTH ORAZ UTWORZENIE PROFILU UŻYTKOWNIKA:

1. Pobierz bezpłatną **aplikację Istel Health** ze sklepu Google Play lub AppStore.
2. Zainstaluj aplikację na swoim telefonie lub tablecie.
3. Utwórz swój **profil użytkownika** uzupełniając formularz (Rys. 1). Zatwierdź wciskając OK.

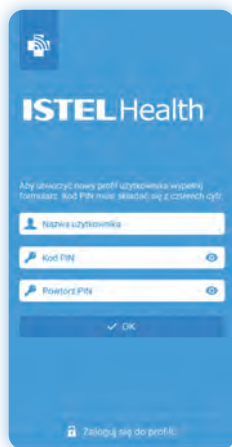

Rys. 1

UWAGA!

Zapamiętaj własny PIN, aby móc zalogować się na urządzeniu w przyszłości.

TU MOŻESZ WPISAĆ SWÓJ PIN

.....

II. POWIĄZANIE UTWORZONEGO W APLIKACJI PROFILU Z KONTEM W SYSTEMIE ISTELE CARE:


1. Wybierz **TAK**, aby powiązać swój profil w aplikacji z kontem w Systemie Istel Care (Rys. 2).
2. Po wybraniu **TAK** możesz:
 - powiązać utworzone w aplikacji konto z istniejącym kontem Pacjenta w Systemie Istel Care (jeśli je wcześniej utworzyłeś). Aby to zrobić uzupełnij dane i kliknij „**Zaloguj**” (Rys. 3) lub
 - utworzyć konto Pacjenta w Systemie Istel Care i powiązać je z profilem w aplikacji. Wybierz „**Załącz nowe konto Istel Care**” i uzupełnij formularz, aby to zrobić (Rys. 4).




Rys. 2

UWAGA!

Zapamiętaj swoje hasło, potrzebne Ci będzie do logowania w Systemie Istel Care.

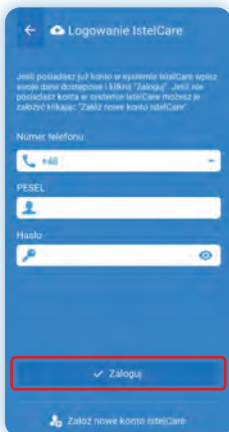

Rys. 3

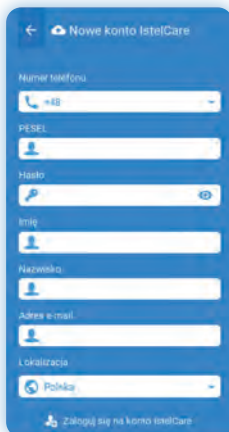


Rys. 4

TU MOŻESZ WPISAĆ SWOJE HASŁO

III. PRZESŁANIE DANYCH Z GLUKOMETRU ABRA SMART BT DO MOBILNEJ APLIKACJI ISTEAL HEALTH:

1. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu mobilnym (telefonie lub tablecie). W głównym oknie aplikacji Istel Health wybierz „**Poziom glukozy**” (Rys. 5), a następnie „**Połącz**” (Rys. 6).



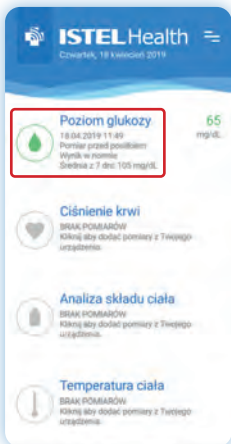

Rys. 5



Rys. 6

2. Włącz glukometr **Abra Smart BT** przyciskiem i poczekaj na wyszukanie urządzenia (Rys. 7).



Rys. 7

3. Pojawi się komunikat z prośbą o wpisanie **kodu PIN** w celu sparowania glukometru z aplikacją (Rys. 8).




Rys. 8

UWAGA! KOD PIN TO **6 CYFR**
Z NUMERU SERYJNEGO SN
PO LITERZE P Z ETYKIETY NA
ODWROCIE GLUKOMETRU (Rys. 9)

UWAGA!

Proces parowania
przeprowadzany jest
jedenrazowo.

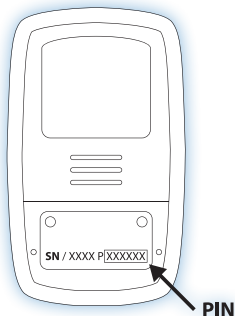

Rys. 9

4. Wybierz „**Synchronizuj**”, aby przesłać dane z glukometru do aplikacji (Rys. 10).



Rys. 10


5. Po zakończeniu synchronizacji Twoje wyniki pomiarów będą widoczne po rozwinięciu **Listy pomiarów** w oknie Poziom glukozy (Rys. 11).



Rys. 11


IV. PRZESYŁANIE DANYCH Z APLIKACJI MOBILNEJ ISTEEL HEALTH NA KONTO PACJENTA W SYSTEMIE ISTEEL CARE

1. W celu przesłania danych z aplikacji Istel Health na konto Pacjenta w Systemie Istel Care przejdź do ustawień aplikacji wybierając **symbol trzech linii** w prawym górnym rogu w głównym oknie aplikacji (Rys. 12).

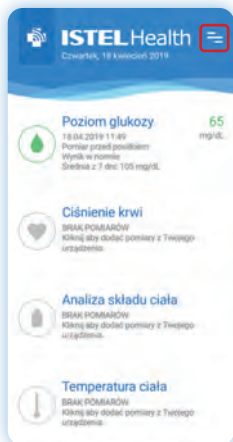


Rys. 12

2. Wybierz „**Konto Istel Care**” (Rys. 13), a następnie **Synchronizuj** (Rys. 14). Dane z aplikacji zostaną automatycznie przesłane do systemu.

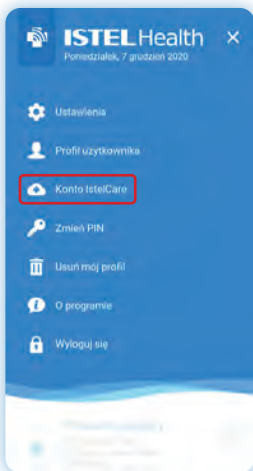

Rys. 13

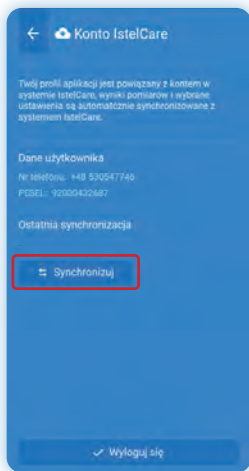

Rys. 14

Gratulacje! Właśnie zostałeś użytkownikiem innowacyjnego rozwiązania telemedycznego jakim jest **System Istel Care**.

Poznaj inne urządzenia medyczne współpracujące z Systemem Istel Care.

Rejestrator EKG Istel HR-2000

To urządzenie medyczne rejestrujące sygnały EKG po przyłożeniu do klatki piersiowej, umożliwiając wykonanie **badania EKG** w każdym miejscu i o każdej porze.

Wyniki badania trafiają do bezpłatnej aplikacji mobilnej **Istel ECG**, a z niej na Kartę Pacjenta w Systemie Istel Care.

Pobierz aplikację Istel ECG z:





Termometr Istel NC300 BT

To bezdotykowy termometr na podczerwień umożliwiający szybki i **precyzyjny pomiar temperatury** ciała oraz otoczenia. Wyniki badania trafiają do bezpłatnej aplikacji mobilnej **Istel Health**, a z niej na Kartę Pacjenta w Systemie Istel Care.

Pobierz aplikację Istel Health z:



Ciśnieniomierz Istel Cardic 100 BT

To urządzenie z dużym, czytelnym wyświetlaczem, dokonujące pomiaru przy **nieregularnym pulsie** (IHB).

Wyniki badania trafiają do bezpłatnej aplikacji mobilnej **Istel Health**, a z niej na Kartę Pacjenta w Systemie Istel Care.



NOTATKI

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

OPTILETS

LANCETY



PAMIĘTAJ!

O REGULARNEJ
WYMIANIE LANCETU

1. NIEUŻYWANY

2. UŻYTY 1 RAZ

3. UŻYTY 10 RAZY

**DLACZEGO NALEŻY
WYMIENIAĆ LANCET?**

- minimalizuje ryzyko zakażenia
- pozwala na łatwiejsze pobranie próbki krwi
- zmniejsza odczucie bólu

Potrzebujesz pomocy w obsłudze systemu Istel Care?

Skontaktuj się z nami:

 istelcare@diagnosis.pl

 885 961 858 (pon-pt w godz. 8.00-16.00)